


CYCPLUS

Czujnik tętna pas na klatkę piersiową
Cycplus H2


Instrukcja obsługi




Zawartość opakowania

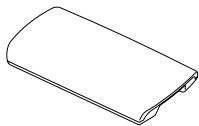

Czujnik tętna

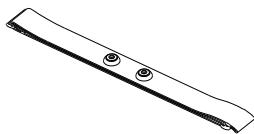


Pas na
klatkę
piersiową

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


Instrukcja
obsługi


Opis produktu

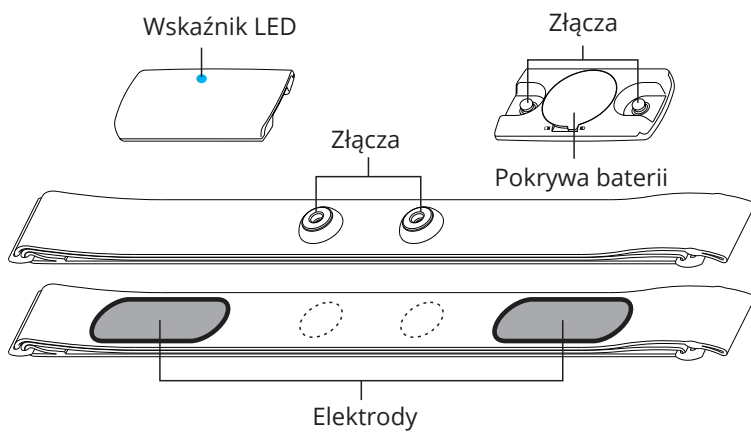


Pierwsza konfiguracja i wymiana baterii

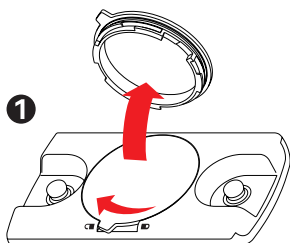


Przesuń pokrywę baterii, aby ją odblokować, a następnie otwórz ją.

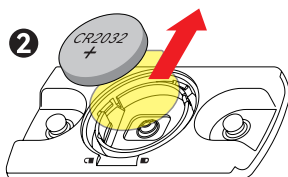

Zdejmij izolację baterii.

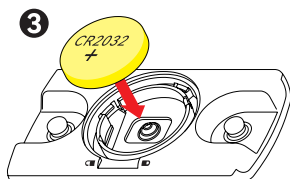


Włóż baterię CR2032 do komory baterii, dodatnim biegunem skierowanym do góry. Upewnij się, że dioda kontrolna miga, potwierdzając prawidłowe zainstalowanie baterii.

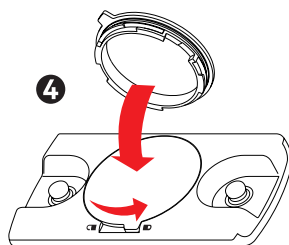


Zamknij pokrywę baterii i przesuń, aby ją zablokować.

Noszenie pasa


- 1 Aby zapewnić prawidłowe wykrywanie tętna przez pasek na klatkę piersiową w każdych warunkach skórnych, zaleca się zwilżenie elektrod wodą przed każdym użyciem.

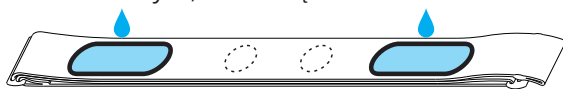

- 2 Zainstaluj czujnik na pasku na klatkę piersiową.

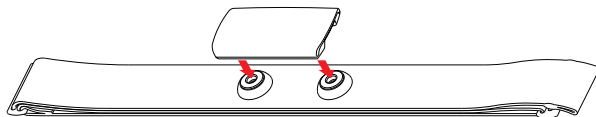

- 3 Wyreguluj długość paska na klatkę piersiową, a następnie zaciśnij pasek wokół klatki piersiowej, tak aby dobrze przylegał do skóry.

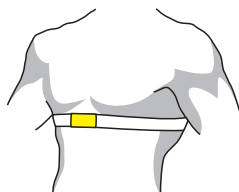

Aktywacja i połączenie

Czujnik ma wbudowany akcelerometr, który uruchamia się, gdy wykryje przyspieszenie. Po włączeniu automatycznie przechodzi w stan gotowości, co pokazuje migająca dioda LED, która pokazuje aktualny poziom naładowania baterii.

Czujnik obsługuje dwa protokoły: ANT+ i Bluetooth, co pozwala na połączenie z komputerami rowerowymi, zegarkami sportowymi i aplikacjami fitness, żeby odbierać i wyświetlać dane.


Uwaga: W przypadku korzystania z protokołu ANT+ można podłączyć jednocześnie wiele urządzeń. W przypadku korzystania z protokołu Bluetooth można podłączyć tylko jedno urządzenie jednocześnie.

Tryb uśpienia

Pas piersiowy po zdjęciu automatycznie przechodzi w tryb uśpienia o niskim zużyciu energii.

Wskaźnik świetlny

- ❶ Wskaźnik świetlny włączy się i będzie migać przez 10 sekund w następujących sytuacjach.
 1. Za każdym razem, gdy bateria zostanie prawidłowo zainstalowana.
- ❷ 2. Gdy pasek pomiaru tętna zostanie przesunięty z przyspieszeniem. Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego wskaźnik świetlny będzie świecić się na czerwono, a po zakończeniu aktualizacji zgaśnie.
- ❸ Kolor lampki kontrolnej wskazuje poziom naładowania baterii.
 - Zielone światło: poziom naładowania baterii $\geq 5\%$
 - Czerwone światło: poziom naładowania baterii $< 5\%$

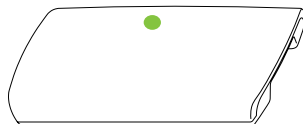

Aplikacja

Wyszukaj „CYCPLUS” w App Store lub Google Play, aby pobrać i korzystać z aplikacji CYCPLUS, która zapewnia szybki dostęp do najnowszych aktualizacji oprogramowania sprzętowego i dodatkowych ustawień. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mogą obejmować zmiany funkcjonalne, dlatego szczegółowe informacje można znaleźć w informacjach o aktualizacji w aplikacji.



Konserwacja i przechowywanie

1. Po każdym użyciu opaski na klatkę piersiową należy ją przepłukać czystą wodą i powiesić lub położyć na płasko do wyschnięcia.
2. Jeśli nie ma możliwości wyprania opaski na klatkę piersiową na zewnątrz, po użyciu należy wytrzeć pot z elektrod, złącza i powierzchni czujnika tętna. Odłączyć czujnik tętna od opaski na klatkę piersiową i umieścić je w dobrze wentylowanym miejscu. Opaskę na klatkę piersiową należy wyczyścić i wysuszyć tak szybko, jak to możliwe.
3. Zaleca się odłączenie czujnika tętna od paska na klatkę piersiową, aby przedłużyć żywotność baterii podczas przechowywania.

Uwagi

1. W zimnym i suchym otoczeniu czujnik może potrzebować kilku minut, aby zapewnić dokładne i stabilne dane. Aby zapewnić precyzję danych treningowych, zaleca się rozpoczęcie rejestrowania treningu po dokładnej rozgrzewce.
2. Podczas noszenia paska na klatkę piersiową należy unikać nadmiernego rozciągania, aby nie uszkodzić elektrod.
3. Nagromadzenie potu może wpływać na dokładność danych, dlatego zaleca się zdejmowanie czujnika po każdym użyciu, przepłukanie paska na klatkę piersiową wodą i rozwieszenie go do wyschnięcia.
4. Należy unikać umieszczania wilgotnego paska na klatkę piersiową w hermetycznych pojemnikach, ponieważ może to spowodować utlenienie złącza, co wpłynie na dokładność pomiarów i skróci jego żywotność.
5. Nie należy używać chemicznych środków czyszczących, ponieważ mogą one wpływać na dokładność paska na klatkę piersiową i skrócić jego żywotność.
6. Po użyciu pasek na klatkę piersiową należy przechowywać w pozycji poziomej lub zawiesić, unikając zginania lub zwijania, oraz chronić przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych.
7. Pasek na klatkę piersiową nie jest urządzeniem medycznym; dane mają charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku odczuwania dyskomfortu należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Specyfikacja

Rozmiar: (70-95)*3,0 x 0,9 cm

Długość paska na klatkę piersiową: 70-95 cm

Bateria: CR 2032 220 mAh

Temperatura pracy: 0-50°C

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku z rowerami zgodnymi z jego specyfikacją. Użycie w innych pojazdach może prowadzić do wypadku lub uszkodzenia produktu.
- Nie stosować produktu, jeśli jest uszkodzony, zużyty lub niekompletny. Zawsze przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie technicznym.
- Produkt nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci, które mogą przypadkowo uszkodzić produkt lub narazić się na niebezpieczeństwo.
- Montaż produktu powinien być przeprowadzany zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Nieprawidłowy montaż może spowodować utratę stabilności roweru lub zagrożenie dla użytkownika.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

- Przed każdą jazdą sprawdź, czy produkt jest odpowiednio zamontowany i zabezpieczony. Luźne elementy mogą wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, np. uchwyty powinny służyć do przewożenia telefonów, bidonów czy innych lekkich przedmiotów, zgodnie z określonymi limitami wagowymi.
- Regularnie kontroluj produkt pod kątem oznak zużycia, korozji lub innych uszkodzeń. W przypadku wykrycia nieprawidłowości należy przerwać użytkowanie i skontaktować się z producentem.

- Produkt powinien być używany w warunkach pogodowych, do których został zaprojektowany. Ekstremalne temperatury, wilgoć lub błoto mogą wpływać na jego funkcjonalność.

Dodatkowe środki ostrożności

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu lub użytkowania produktu skontaktuj się z autoryzowanym serwisem lub producentem.
- Unikaj przeciążania produktu — maksymalne dopuszczalne obciążenie podane w instrukcji obsługi nie powinno być przekraczane.
- Jeśli produkt jest przeznaczony do stosowania w ruchu drogowym, upewnij się, że spełnia wszystkie lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, np. odbłaski lub światła.
- Po długim okresie użytkowania lub w przypadku intensywnej eksploatacji zaleca się przeprowadzenie przeglądu produktu w certyfikowanym punkcie serwisowym.

Oświadczenie zgodności

Produkt został zaprojektowany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełnia on odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), bezpieczeństwa elektrycznego oraz ochrony użytkowników przed zagrożeniami mechanicznymi i środowiskowymi.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Chengdu Chendian Intelligent Technology CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Czujnik tętna pas na klatkę piersiową Cycplus H2 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/cycplus>

Adres producenta: Tianchen Road Building 2 610000 Chengdu, cn

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

SUALMU GmbH

Am Waldfriedhof 4

76297 Stutensee, Niemcy

EUVERTRETERSUALMUGMBH@outlook.com

Specyfikacje baterii produktu

Cecha	Wartość
Kategoria baterii	Bateria przenośna
Typ baterii	Portable button cell batteries: Lithium CR2032
Zawiera Kadm/Ołów (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nie
Waga netto (kg)	0.00298
Pojemność (mAh)	200mAh